

## **Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия**

### **Наименование медицинского изделия**

ОКУТИАРЗ® АЛО+ капли глазные, 10 мл

### **Состав и описание медицинского изделия**

ОКУТИАРЗ® АЛО+ - это увлажняющий стерильный офтальмологический раствор, не содержащий консервантов. В состав капель входят перекрестно-связанный натрия гиалуронат (0,2%) и Алоэ Вера (0,1%), действие которых направлено на устранение симптомов «сухого глаза», дискомфорта глаз, а также на защиту роговицы.

Состав: перекрестно-связанный натрия гиалуронат 0,2%, порошок геля Алоэ Вера 0,1%, динатрия тетраборат декагидрат, борная кислота, натрия хлорид, вода для инъекций.

**Не является лекарственным средством.**

**Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с которым произведено медицинское изделие:**

В соответствии с технической документацией производителя

### **Область применения**

Офтальмология

**Пользователь МИ:** физическое лицо

### **Назначение медицинского изделия**

ОКУТИАРЗ® АЛО+ предназначен для устранения симптомов «сухого глаза», раздражения и покраснения, вызванного воздействием окружающей среды или лекарственными препаратами.

Может применяться также при ношении контактных линз для увлажнения и комфорта глаз.

ОКУТИАРЗ® АЛО+ полезен во время и после:

- длительного воздействия солнечного света
- воздействия кондиционирования воздуха
- длительного просмотра цифрового экрана

ОКУТИАРЗ® АЛО+ может также помочь облегчить дискомфорт после хирургической операции на глазах.

Если симптомы сохраняются, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Перекрестно-связанный натрия гиалуронат придает раствору высокую вязкоэластичность, что обеспечивает высокую степень увлажнения глазной поверхности, а также долгосрочное облегчение симптомов «сухого глаза».

Алоэ Вера, благодаря своим увлажняющим, противозастойным и смазывающим свойствам, придает раствору высокую увлажняющую способность, улучшая комфорт глаз и увеличивая продолжительность ощущения свежести. Также подтверждена эффективность Алоэ Вера при покраснении или чувствительности глаз, благодаря его выраженному и длительному защитному эффекту.

### **Способ применения**

Для закапывания в глаз. Не глотать.

Рекомендуемый режим дозирования по 1-2 капли в каждый глаз один или несколько раз в день в соответствии с рекомендациями Вашего врача или фармацевта.

Перед открытием флакона вымойте руки и соблюдайте правила гигиены во время использования.

Избегайте контакта кончика флакона с поверхностью глаза.

Инструкции по применению:

1. При первом использовании флакона потяните и полностью удалите ленту-контроль первого вскрытия.
2. Аккуратно сожмите флакон и закапайте 1 каплю в глаз.
3. Плотнo закройте флакон после использования.



### **Информация по мерам предосторожности (безопасности) и ограничениям при использовании медицинского изделия:**

Перед применением внимательно прочитайте инструкцию по применению.

Сохраните данный листок-вкладыш, возможно Вам потребуется прочитать его еще раз.

В случае возникновения дополнительных вопросов, обратитесь к врачу или фармацевту.

### **Противопоказания**

Не применять при возникновении аллергической реакции или при повышенной чувствительности к любому из компонентов ОКУТИАРЗ® АЛО+. В случае серьезных заболеваний роговицы проконсультируйтесь с врачом или

фармацевтом перед применением.

### **Побочные эффекты**

Как и в случае применения других глазных капель, возможно появление слабого временного дискомфорта, связанного с инстилляцией продукта.

**В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ, СООБЩИТЕ О НИХ ВРАЧУ ИЛИ ФАРМАЦЕВТУ.**

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Не замораживать.

Защищать от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги.

Не применять, если упаковка повреждена.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 36 месяцев.

Использовать в течение 90 дней после вскрытия флакона.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Форма выпуска:** 1 флакон объемом 10 мл с инструкцией по применению в картонной упаковке.

### **Производитель**

OFFHEALTH S.P.A., Via Giovanni Paisiello 10, 50144 Firenze (FI), Италия

Тел: +39 055 016 17 71

Электронная почта: [info@offhealth.it](mailto:info@offhealth.it)

### **Производственная площадка**

C.O.C. FARMACEUTICI S.R.L., Via Modena 15, 40019 Sant'Agata Bolognese (BO), Италия

Тел: +39 (051) 6 82 98 1

Факс: +39 (051) 95 68 38

Электронная почта: [coc@coc.it](mailto:coc@coc.it)

**Уполномоченный представитель производителя на территории Республики Казахстан: организация принимающая претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей и ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан**

Представительство АО «Сантен» в Республике Казахстан

ул. Чаплина 71/66, 050019, Алматы, Казахстан

Тел.: 250-39-17

Электронная почта: [santen.kaz@santen.com](mailto:santen.kaz@santen.com)

Данные о последнем пересмотре инструкции по медицинскому применению  
 XX.XX.202X

Расшифровка символов и обозначений, использованных при маркировке

Символ											
Значение	Производитель	Верхняя граница температурного диапазона	Стерилизация с применением методов асептической обработки	Код партии	Дата производства	Использовать до ...	Прочтите инструкцию по применению	Защищать от воздействия тепла и прямых солнечных лучей	Защищать от влаги	Не использовать при повреждении упаковки	Знак соответствия изделия основным требованиям директив и гармонизированным стандартам Европейского союза, цифры обозначают идентификационный номер уполномоченного органа, выдавшего знак