

Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия

Наименование медицинского изделия

ОКУТИАРЗ® ГИДРО+, капли глазные, 10 мл

Состав и описание медицинского изделия

ОКУТИАРЗ® ГИДРО+ - это увлажняющий стерильный офтальмологический раствор, не содержащий консервантов. В состав капель входит перекрестно-связанный натрия гиалуронат (0,2%), действие которого направлено на устранение симптомов «сухого глаза», дискомфорта глаз, а также на защиту роговицы.

Состав: перекрестно-связанный натрия гиалуронат 0,2%, динатрия тетраборат декагидрат, борная кислота, натрия хлорид, вода для инъекций.

Не является лекарственным средством.

Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с которым произведено медицинское изделие:

В соответствии с технической документацией производителя

Область применения

Офтальмология

Пользователь МИ: физическое лицо

Назначение медицинского изделия

ОКУТИАРЗ® ГИДРО+ предназначен для облегчения симптомов «сухого глаза», дискомфорта глаз, а также для защиты роговицы в качестве заменителя слезы, обеспечивая длительное увлажнение.

Может применяться также при ношении контактных линз для увлажнения глаз.

ОКУТИАРЗ® ГИДРО+ полезен во время и после:

- длительного воздействия солнечного света
- воздействия кондиционирования воздуха
- длительного просмотра цифрового экрана
- контакта с очищающими средствами

ОКУТИАРЗ® ГИДРО+ может также помочь облегчить дискомфорт после хирургической операции на глазах.

Если симптомы сохраняются, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Перекрестно-связанный натрия гиалуронат придает раствору высокую вязкоэластичность, что обеспечивает высокую степень увлажнения глазной

поверхности, а также долгосрочное облегчение симптомов «сухого глаза», как, например, боль, жжение, покалывание, ощущение песка, усталость глаз, тяжесть в глазах или слезящиеся глаза.

Способ применения

Для закапывания в глаз. Не глотать.

Рекомендуемый режим дозирования по 1-2 капли в каждый глаз один или несколько раз в день в соответствии с рекомендациями Вашего врача или фармацевта.

Перед открытием флакона вымойте руки и соблюдайте правила гигиены во время использования.

Избегайте контакта кончика флакона с поверхностью глаза.

Инструкции по применению:

1. При первом использовании флакона потяните и полностью удалите ленту-контроль первого вскрытия.
2. Аккуратно сожмите флакон и закапайте 1 каплю в глаз.
3. Плотнo закройте флакон после использования.



Информация по мерам предосторожности (безопасности) и ограничениям при использовании медицинского изделия:

Перед применением внимательно прочитайте инструкцию по применению.

Сохраните данный листок-вкладыш, возможно Вам потребуется прочитать его еще раз.

В случае возникновения дополнительных вопросов, обратитесь к врачу или фармацевту.

Противопоказания

Не применять при возникновении аллергической реакции или при повышенной чувствительности к любому из компонентов ОКУТИАРЗ® ГИДРО+.

Побочные эффекты

Как и в случае применения других глазных капель, возможно появление слабого временного дискомфорта, связанного с инстилляцией продукта.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ,
СООБЩИТЕ О НИХ ВРАЧУ ИЛИ ФАРМАЦЕВТУ.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Не замораживать.

Защищать от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги.

Не применять, если упаковка повреждена.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 24 месяца.

Использовать в течение 90 дней после вскрытия флакона.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Форма выпуска: 1 флакон объемом 10 мл с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Производитель

OFFHEALTH S.P.A., Via Giovanni Paisiello 10, 50144 Firenze (FI), Италия

Тел: +39 055 016 17 71

Электронная почта: info@offhealth.it

Производственная площадка

C.O.C. FARMACEUTICI S.R.L., Via Modena 15, 40019 Sant'Agata Bolognese (BO), Италия

Тел: +39 (051) 6 82 98 1

Факс: +39 (051) 95 68 38

Электронная почта: coc@coc.it

Уполномоченный представитель производителя на территории Республики Казахстан: организация принимающая претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей и ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан

Представительство АО «Сантен» в Казахстане

Ул. Панфилова 98, офис 713, 050000 Алматы, Казахстан




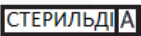








Тел.: 250-39-17

Электронная почта: santen.kaz@santen.com

Данные о последнем пересмотре инструкции по медицинскому применению

ДД.ММ.ГГГГ

Расшифровка символов и обозначений, использованных при маркировке

| Символ | Расшифровка |
|---|--|
|  | Производитель |
|  | Верхняя граница температурного диапазона |
|  | Стерилизация с применением методов асептической обработки |
|  | |
|  | Код партии |
|  | Дата производства |
|  | Использовать до ... |
|  | Прочтите инструкцию по применению |
|  | Защищать от воздействия тепла и прямых солнечных лучей |
|  | Защищать от влаги |
|  | Не использовать при повреждении упаковки |
|  | Знак соответствия изделия основным требованиям директив и гармонизированным стандартам Европейского союза, цифры обозначают идентификационный номер уполномоченного органа, выдавшего знак |